

CONTACTLENSVERZORGING

'SOCHTENDS



Was je handen met zeep en droog ze vervolgens af met een schone handdoek of tissue.



Pak de lens, leg deze in je handpalm en spoel de lens af met verse multipurpose contactlensvloeistof.



Zet de lens in. Doe nu hetzelfde met je andere lens.



Gooi alle gebruikte multipurpose vloeistof weg, spoel de lenshouder schoon met verse multipurpose contactlensvloeistof.



Droog de lenshouder met een schone tissue en laat hem open en ondersteboven drogen op een tissue. Draai de dop op de fles contactlensvloeistof.

'S AVONDS

Was je handen met zeep en droog ze vervolgens af met een schone handdoek of tissue.



Vul de lenshouder tot net onder de rand.




Neem je lens uit, leg deze in je handpalm. Wrijf de lens met enkele druppels multipurpose contactlensvloeistof met je wijsvinger aan beide zijden schoon (10 sec.).



Spoel de lens goed af met verse multipurpose contactlensvloeistof. Doe de lens in de lenshouder en herhaal het met je andere lens.



Volledige desinfectie kan alleen als je de lenzen tenminste 4 uur in multipurpose contactlensvloeistof laat liggen.¹

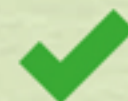

- Was **ALTIJD** je handen.
- Gebruik **ALTIJD** verse contactlensvloeistof.
- **NIEUWE** lenshouder bij elke **NIEUWE** fles vloeistof.
- Draai de dop **ALTIJD** stevig terug op de fles.
- **ONMIDDELIJK** contact opnemen als je ogen rood, geïrriteerd of overgevoelig zijn voor licht.
- Een geopende fles contactlensvloeistof kan **3 MAANDEN** worden bewaard. Zet een herinnering in je agenda om de fles tijdig te vervangen.



- Gebruik **NOOIT** kraanwater.
- **NOOIT** contactlensvloeistof aanvullen of hergebruiken.
- Draag **NOOIT** je contactlenzen als je ogen rood of geïrriteerd zijn.
- Raak **NOOIT** de flesopening aan, dit vervuult de vloeistof.
- Bij oogmedicijnen, **NOOIT** je contactlenzen dragen zonder vooraf overleg.

¹ Bij het gebruik van Biotrue® Multipurpose Solution, ReNu® MPST™ Sensitive Eyes en ReNu® Multiplus® Fresh Lens Comfort. ®/™ geven handelsmerken aan van Bausch & Lomb Incorporated. Andere product-/merknamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. 21019