



Bausch + Lomb Biotrue® multi-purpose solution

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING: Volg deze 3 eenvoudige stappen om uw lenzen dagelijks te verzorgen, reinigen, desinfecteren en proteïne te verwijderen. Deze dagelijkse contactlensverzorging wordt aanbevolen door Bausch + Lomb voor het gezond en comfortabel dragen van contactlenzen:

STAP 1:

Breng 3 druppels Biotrue® multi-purpose solution aan op elke kant van de lens en wrijf elke kant gedurende 20 seconden voorzichtig schoon.

STAP 2:

Spoel elke kant van de lens gedurende 5 seconden af met Biotrue® multi-purpose solution.

STAP 3:

Plaats de gereinigde contactlens in de lenshouder en vul deze met verse Biotrue® multi-purpose solution. Laat de lenzen tenminste 4 uur in de vloeistof staan. Zorg dat u altijd verse lensvloeistof gebruikt.

Uw contactlenzen zijn nu klaar voor gebruik. Als er nog vuil op de contactlenzen zit, spoel ze dan af met Biotrue® multi-purpose solution voordat u de lenzen inzet. Volg altijd het advies van uw contactlensspecialist. Op basis van de samenstelling van uw traanvocht en draagschema, kan uw contactlensspecialist aanvullende producten of procedures aanbevelen. Als u uw contactlenzen niet onmiddellijk inbrengt, bewaar ze dan in een afgesloten lenshouder. Bewaar uw lenzen niet in een zoutoplossing in plaats van in de Biotrue® multi-purpose solution. Een zoutoplossing heeft geen desinfecterende werking. U kunt uw lenzen maximaal 30 dagen in een afgesloten lenshouder bewaren. Indien u uw lenzen voor langere tijd wilt bewaren, moet u ze voor gebruik opnieuw reinigen en desinfecteren met verse Biotrue® multi-purpose solution.

INHOUD: Hyaluronaat, sulfobetaine, poloxamine, boorzuur, boraatzout, dinatriumedetaat en natriumchloride; geconserveerd met polyaminopropyl biguanide 0,00013% en polyquaternium 0,0001%

WERKING: Dagelijks gebruik van Biotrue® multi-purpose solution reinigt en verwijdert ophopingen van vet, proteïne en andere aanslag en vuil van zachte contactlenzen. Vernietigt schadelijke micro-organismen op de lens. Biotrue® multi-purpose solution helpt de vorming van aanslag op het lensoppervlak te voorkomen. Het doodt schadelijke micro-organismen op de lens. Tijdens het bewaren van de lenzen, omhult



de contactlensvloeistof de lens met een vochtig laagje waardoor de lens overdag comfortabel kan worden gedragen. Biotrue® multi-purpose solution kan ook worden gebruikt om lenzen af te spoelen.

INDICATIES (voor gebruik): Biotrue® multi-purpose solution is geïndiceerd voor dagelijkse verzorging, reiniging, verwijdering van proteïne-aanslag, afspoelen, chemische (niet-thermische) desinfectie en het bewaren van zachte (hydrofiële) contactlenzen, waaronder Silicone Hydrogel contactlenzen, zoals aanbevolen door uw contactlensspecialist.

CONTRA-INDICATIES (redenen om niet te gebruiken): Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen in het product, dit product niet gebruiken.

WAARSCHUWING: PROBLEMEN MET CONTACTLENZEN EN LENSVERZORGINGSPRODUCTEN KUNNEN LEIDEN TOT OOGINFECTIES VAN EN/OF BESCHADIGING VAN HET HOORNVLIES EN ZELFS TOT HET VERLIES VAN HET GEZICHTSVERMOGEN. Het is essentieel dat u de instructies over de verzorging van uw lenzen en lensproducten door uw contactlensspecialist en op de bijsluiters van producten en lenshouders nauwkeurig opvolgt. Oogaandoeningen, inclusief hoornvliesontsteking, ontwikkelen zich razendsnel en kunnen leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Daily wear contactlenzen (alleen overdag dragen) zijn niet geschikt om 's nachts door te dragen en mogen dan ook niet worden gedragen tijdens het slapen. Draggers van contactlenzen wordt aangeraden om minimaal twee keer per jaar hun contactlensspecialist te bezoeken. Iedere keer dat u uw lenzen in de lenshouder bewaart moet u deze vullen met verse lensvloeistof; vul nooit de vloeistof bij of hergebruik de oude vloeistof. U moet de oude vloeistof direct weggooien nadat u uw lenzen uit de lenshouder heeft gehaald. U mag uw lenzen nooit behandelen met water of bewaren in een lenshouder die is omgespoeld met water, zij het kraanwater, flessenwater of gedistilleerd water of een andere niet-steriele vloeistof. Reinig, spoel en laat uw lenshouder altijd aan de lucht drogen wanneer u uw lenzen uit de houder haalt. Laat de lenshouder ondersteboven aan de lucht drogen, zodat de overtollige vloeistof weg kan lopen. Vervang regelmatig uw lenshouder.

Indien u nalaat de vloeistof na ieder gebruik uit de lenshouder weg te gooien of water gebruikt bij de verzorging van uw lenzen, kan dit leiden tot ooginfecties en mogelijk verlies van het gezichtsvermogen. Zie de meegeleverde bijsluiters voor belangrijke aanvullende veiligheidsvoorschriften.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Volg altijd de gebruiksaanwijzing bij het product op.



- Bezoek regelmatig uw contactlensspecialist.
- Was en droog altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen aanraakt.
- Gebruik geen kraanwater, flessenwater of speeksel om lenzen of de lenshouder mee te reinigen.
- Gebruik alleen verse lensvloeistof om contactlenzen te reinigen en te desinfecteren.
- Gooi de lensvloeistof in de lenshouder na ieder gebruik weg.
- Zoutoplossingen of oogdruppels desinfecteren uw lenzen niet.
- Volg altijd het vervangingsschema van lenzen en vloeistof zoals geadviseerd.
- Vervang lenzen, vloeistof en lenshouder zoals aangegeven.
- Zorg om infecties te voorkomen dat de bovenkant van de lenshouder nergens mee in contact komt. Plaats na gebruik de dop direct terug.
- Niet gebruiken voor de thermische desinfectiemethode.

WAARSCHUWINGEN:

- Gooi na elk gebruik de vloeistof in de lenshouder weg.
- Houdt de fles goed afgesloten indien deze niet in gebruik is.
- Bewaren op kamertemperatuur.
- Houd u aan de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op de verpakking en de fles.
- Gooi 90 dagen na opening de resterende lensvloeistof weg.
- Buiten bereik van kinderen houden

NEGATIEVE BIJWERKINGEN (problemen, en wat te doen): De volgende problemen kunnen zich voordoen: prikkende ogen, branderig of jeukend gevoel (irritatie), ongemak na het inzetten van de lens, het gevoel of er zich iets in het oog bevindt (een vreemd voorwerp of een beschadiging), overmatig tranende ogen, ongewone oogafscheiding, roodheid in de ogen, minder scherp zien (slechte gezichtsscherpte), wazig zien, kleuren of halo's rondom voorwerpen zien, gevoeligheid voor licht (fotosensitiviteit), of droge ogen. **Wanneer u één van de bovenstaande symptomen ervaart: onmiddellijk uw lenzen uitdoen.**

- Wanneer het ongemak of probleem daarmee overgaat, bekijk de lens dan zorgvuldig.
- Als de lens is beschadigd, gebruik deze dan niet meer. Plaats de lens in de lenshouder en neem contact op met uw contactlensspecialist.
- Als de lens vies is, of er een wimper of iets anders aan zit, of wanneer het probleem overgaat en de lens onbeschadigd lijkt, reinig en desinfecteer de lens en plaats deze terug in het oog.
- Wanneer het probleem aanhoudt, doe onmiddellijk de lens uit en raadpleeg uw contactlensspecialist.



Wanneer zich één van de bovenstaande symptomen voordoet, kan er sprake zijn van een ernstige aandoening, waaronder een infectie, hoornvliesontsteking, neovascularisatie (vaatingroei) of iritis (ontsteking). Raadpleeg onmiddellijk een deskundige om de soort aandoening vast te stellen en te laten behandelen om verdere beschadigingen aan het oog te voorkomen.

GOEDE LENSVERZORGING EN HYGIËNE:

- Was en droog altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen aanraakt.
- Reinig, spoel en desinfecteer na gebruik altijd uw lenzen.
- Begin altijd met dezelfde lens, links dan wel rechts, om verwarring te voorkomen.
- Gooi uw lenshouder na ieder gebruik leeg en spoel deze vervolgens om met Biotrue® multi-purpose solution en laat de lenshouder aan de lucht drogen.

VERKRIJGBAARHEID: Biotrue® multi-purpose solution is verkrijgbaar in steriele plastic flessen van 60, 240 en 300 ml. De fles en doos moeten voorzien zijn van een LOT-nummer en een vervaldatum.