

## **BAUSCH+ LOMB BOSTON ADVANCE™ Cleaner**

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

**Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen.**

**OMSCHRIJVING:** Dagelijks gebruik van BAUSCH+LOMB BOSTON ADVANCE™ CLEANER voorkomt de opbouw van hardnekkige vuilafzetting, wat het draagcomfort van harde zuurstofdoorlatende lenzen vermindert. Speciaal ontwikkeld voor gebruik met BAUSCH+LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution

**INHOUD:** Actief bestanddeel: Alkyl sulfaat surfactant (8.0 % w/v).  
Overige bestanddelen: Sodium chloride, Sodium fosfaat, non ionische alcohol surfactant, silica gel suspensie; bevat titanium dioxide.

**GEBRUIKSAANWIJZING:** Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:

**STAP 1:**

Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.

**STAP 2:**

Leg de lens in de palm van uw hand en doe enkele druppels BOSTON ADVANCE™ CLEANER op de lens. Wrijf vervolgens gedurende 20 seconden.

**STAP 3:** Verwijder elk restant van de BOSTON ADVANCE™ CLEANER door de lens zorgvuldig af te spoelen, conform de aanwijzingen van uw contactlensspecialist.

**STAP 4:**

Plaats de lens in de lenshouder en vul deze met verse BOSTON ADVANCE™ COMFORT FORMULA CONDITIONING SOLUTION. Laat de lenzen tenminste 4 uur (of gedurende de hele nacht) in de vloeistof staan voor u ze weer inzet.

**INDIEN DE CLEANER PER ONGELUK TOCH IN CONTACT KOMT MET HET OOG, ONMIDDELIJK DE LENS UITNEMEN EN HET OOG UITSPOELEN MET SCHOON, STROMEND KRAANWATER TOTDAT ALLE CLEANER IS VERDWENEN. ALS U LAST HEEFT VAN DISCOMFORT OF PIJN, OVERMATIG TRANEN, VERANDERING IN HET GEZICHTSVERMOGEN OF ROODHEID, NEEM DAN ONMIDDELIJK UW LENZEN UIT EN RAADPLEEG UW CONTACTLENSPECIALIST.**

**BELANGRIJK:**

- Nooit de vloeistof hergebruiken.
- ALTIJD UW LENZEN BEWAREN IN CONDITIONING SOLUTION. NOOIT UW LENZEN BEWAREN OF LATEN STAAN IN CLEANER. ALTIJD GRONDIG UW LENZEN AFSPOELEN (VOLGENS DE INSTRUCTIES VAN UW CONTACTLENSPECIALIST) NA HET REINIGEN MET CLEANER EN VOORDAT U ZE VERZORGT MET CONDITIONING SOLUTION.

- De opening van de fles niet met iets in aanraking brengen, dit kan de vloeistof verontreinigen.
- Fles goed gesloten houden tussen gebruik door.
- Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.
- Gebruiken vóór verstrijken houdbaarheidsdatum welke op de fles staat.

**WAARSCHUWING:**

Buiten bereik van kinderen houden.

Niet gebruiken na verstrijken houdbaarheidsdatum.

Niet gebruiken indien verzegeling ontbreekt of verbroken is.

Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

Resterende vloeistof 3 maanden na opening weggooien.

**NIET GEBRUIKEN VOOR ZACHTE CONTACTLENZEN.**

**VERKRIJGBAARHEID:**

BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ CLEANER is verkrijgbaar in een steriele 30 ml en 10 ml fles.

De fles is voorzien van een uiterste vervaldatum en een lotnummer.



Bausch & Lomb Incorporated,  
Rochester, NY 14609, U.S.A.



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road, Kingston upon Thames, KT2 6TN, UK

C E 0050



Made in Italy

Boston Advance is een handelsmerk van Bausch & Lomb Incorporated.  
© Bausch & Lomb Incorporated.