

BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution

**LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK**

Speciaal geschikt voor fluor siliconen acrylaat, siliconen acrylaat en vormstabiele zuurstofdoorlatende contactlenzen nadat de lenzen zijn gereinigd. Het is tevens geschikt voor PMMA (harde) lenzen.

OMSCHRIJVING: BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution is een special geformuleerde vloeistof voor harde, zuurstofdoorlatende (RGP) en harde contactlenzen. Het bevat een gepatenteerd, multi-polymeer comfort systeem dat de oppervlakte van de lens van een beschermend laagje voorziet. Het verzacht de lens bij het inzetten en onderhoudt en verbetert de lensbevochtiging gedurende de dag. Het gepatenteerde multi-polymeer systeem van BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution vermindert de wrijving van de lens op het oog en ooglid en verwijdert tegelijkertijd losse deeltjes die mogelijk discomfort of irritatie kunnen veroorzaken. Deze formule is special ontworpen om biocompatibel te zijn met uw ogen. Het bevat tevens een geoptimaliseerd conserveringssysteem dat effectief schadelijke organismes vernietigd op RGP en harde contactlenzen.

INHOUD:

Desinfectanten: polyaminopropyl biguanide (0.0005% w/v), chloorhexidine gluconaat (0.003% w/v), disodium edetate (0.05% w/v).

Overige bestanddelen: zouten en buffers, polyquaternium 10, cellulose viscosifier, polyvinyl alcohol, polyethyleen glycol derivaten.

GEBRUIKSAANWIJZING: Verwijder de verzegeling. Niet gebruiken indien de verzegeling van de fles ontbreekt of verbroken is. Om zeker te zijn van een juiste desinfectie, dienen alle hieronder genoemde stappen te worden opgevolgd:

STAP 1:

Was altijd uw handen voor u uw lenzen of uw ogen aanraakt.

STAP 2:

Reinig en verzorg uw contactlenzen volgens de instructies van uw contactlensspecialist.

STAP 3:

Plaats iedere lens in het eigen compartiment van de lenshouder en vul deze met een verse hoeveelheid BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution.

STAP 4:

Laat uw lenzen tenminste vier (4) uur in de vloeistof staan voor een juiste desinfectie voordat u ze weer inzet.

STAP 5:

Wanneer u de lenzen uit de lenshouder neemt, spoel nogmaals met verse vloeistof alvorens ze in te zetten.

STAP 6:

Altijd grondig de lenshouder reinigen met BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution en iedere dag aan de lucht laten drogen.

BELANGRIJK: Het is essentieel dat u de instructies van de verpakkingen en de gebruiksaanwijzingen van uw contactlensspecialist zorgvuldig opvolgt, met betrekking tot de zorg voor uw ogen en het juiste gebruik van uw contactlenzen en contactlensverzorgingsproducten.

- Nooit de vloeistof hergebruiken. Voor een optimale desinfectie, iedere dag alle vloeistof in uw lenshouder vervangen voordat u uw lenzen daarin plaatst.
- Nooit uw lenzen in reinigingsvloeistof bewaren.
- Vloeistof gebruiken vóór het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Ook al is de fles nog ongeopend, nooit gebruiken na de vervaldatum.
- Fles en vloeistof negentig (90) dagen na opening weggoien.
- Altijd de juiste hygiëneregels en handelingstechnieken gebruiken. Bij verkeerd handelen kunnen contactlenzen en contactlensvloeistoffen makkelijk besmet raken met veel voorkomende bacteriën.
- Voorkom dat deze vloeistof in contact komt met kleding of handdoeken: dit kan vlekken geven.

WAARSCHUWING:

- Deze vloeistof is niet geschikt voor gebruik met zachte contactlenzen.
- BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
- Niet gebruiken indien verzegeling ontbreekt of verbroken is.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor één van de ingrediënten.

ALS U LAST HEEFT VAN DISCOMFORT OF PIJN, OVERMATIG TRANEN, VERANDERING IN HET GEZICHTSVERMOGEN OF ROODHEID, NEEM DAN ONMIDDELLIJK UW LENZEN UIT EN RAADPLEEG UW CONTACTLENSPECIALIST.

VERKRIJGBAARHEID: BAUSCH & LOMB BOSTON ADVANCE™ Comfort Formula Conditioning Solution is verkrijgbaar in steriele flessen van 120ml en 30ml. Iedere fles is voorzien van een zogenaamd lot number en een houdbaarheidsdatum.



Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, U.S.A.



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston upon Thames, KT2 6TN, UK

C € 0050



Made in Italy

Boston Advance is een handelsmerk van Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.