

# BAUSCH+LOMB SOFLENS®



## GEBRUIKSINSTRUCTIES

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie voor gebruikers over het gebruik en onderhoud van Bausch+Lomb (Hilafilcon B, Polymacon en Alphafilcon A) hydrofiele zachte contactlenzen.

Dit is van toepassing op:

PRODUCTNAAM	MATERIAAL	WATERPERCENTAGE	VLOEISTOF IN DE BLISTER
SofLens® 59 (Hilafilcon B) contactlenzen	Hilafilcon B	59% van het gewicht	Boraat gebufferde saline
SofLens® 38 (Polymacon B) contactlenzen	Polymacon B	38.6% van het gewicht	Fosfaat gebufferde saline
SofLens® Natural Colors (Polymacon B) contactlenzen			
SofLens® Multi-Focal (Polymacon B) contactlenzen			
SofLens® Toric (Alphafilcon A) contactlenzen	Alphafilcon A	66% van het gewicht	Boraat gebufferde saline

## Omschrijving en gebruik

De SofLens® 59 en SofLens® Multifocal zijn bestemd voor dagelijks gebruik met een vervangingsperiode zoals aangegeven door de contactlensspecialist/opticien.

De SofLens® 38 en SofLens® Toric zijn ontworpen voor zowel dagelijks dragen zoals geadviseerd door uw contactlensspecialist/opticien. Als de lenzen opnieuw worden gebruikt dan moeten zij na het uitnemen worden gereinigd, afgespoeld en gedesinfecteerd. Volg altijd het draagschema op en vervang de lenzen zoals door de contactlensspecialist is aangegeven.



Deze lenzen worden steriel geleverd en zijn door de fabrikant bedoeld voor gebruik zoals voorgeschreven door de contactlensspecialist/opticien. De lenzen zijn met behulp van stoom gesteriliseerd.

NIET GEBRUIKEN als de verpakking beschadigd of geopend is.

## Instructies voor het inzetten en uitnemen van de lenzen

Voordat u de lenzen aanraakt, moet u altijd uw handen grondig wassen en drogen. Vermijd het gebruik van geparfumeerde of medische zeep. Leg de lens in uw handpalm. Zorg dat de lens de juiste kant naar buiten heeft.



Controleer de lens alvorens u ze inzet. Zet deze niet in als ze beschadigd is of als er krassen op te zien zijn.

Voor het uitnemen van de lenzen zorgt u dat u eerst uw handen wast en droogt. Gebruik uw vingers om de lens naar beneden te schuiven naar het oogwit, en neem de lens vervolgens uit. Gebruik contactlensvloeistof als het moeilijk is om de lens te verwijderen.

### Onderhoud van uw lenzen

- Het reinigen en desinfecteren van uw lenzen na het uitnemen is van essentieel belang voor de gezondheid van uw ogen
- Maak enkel gebruik van producten die geschikt zijn voor zachte contactlenzen en volg de aanwijzingen op van de fabrikant
- Gebruik steeds verse contactlensvloeistof voor het onderhoud van uw lenzen. Let op de houdbaarheidsdatum
- Gebruik geen andere vloeistoffen, zoals kraanwater, mineraalwater of speeksel om lenzen te bewaren of te bevochtigen
- Zorg dat de lenzen altijd volledig ondergedompeld zijn in de aanbevolen contactlensvloeistof wanneer ze niet worden gedragen
- Vergeet niet om ook uw lenshouder te reinigen wanneer u uw lenzen reinigt
- Gooi altijd uw lenzen weg aan het einde van het draagschema dat werd voorgeschreven door uw contactlensspecialist/opticien
- Was en droog altijd uw handen voordat u uw lenzen aanraakt
- Zorg dat er geen cosmetica, lotions, zeep, crèmes of geparfumeerde stoffen in de ogen of op de lenzen terecht komt
- Gebruik nooit scherpe voorwerpen of uw nagels voor het verwijderen van lenzen uit de lenshouder of uw ogen

### Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Wanneer u de adviezen van uw contactlensspecialist/opticien voor het dragen en reinigen van uw lenzen niet opvolgt, loopt u een groter risico op ooginfecties.

Draag geen contactlenzen bij één van de volgende symptomen:

- Allergie, ontstekingen, infectie of roodheid in of rond de ogen
- Droge ogen (onvoldoende traanvocht)
- Slechte gezondheid die invloed heeft op de ogen, bijv. verkoudheid en griep
- Een systemische aandoening die de ogen aantast

Raadpleeg in de volgende gevallen uw contactlensspecialist/opticien voordat u lenzen gaat dragen:

- Het beoefenen van watersporten
- Langdurig verblijf in uiterst droge of stoffige omgevingen
- Bij gebruik van oogmedicatie

Neem uw lenzen onmiddellijk uit als u één van de volgende problemen ondervindt:

- Prikkende, branderige, jeukende, geïrriteerde of andere pijn aan het oog
- Minder comfort bij het dragen van de lenzen
- Ongewone afscheiding of overmatig tranen van de ogen
- Rode ogen
- Zeer droge of aanhoudend droge ogen
- Verminderd of onscherp zicht
- Regenbogen of kringen rond licht
- Gevoeligheid voor licht

Indien één van deze symptomen na het uitnemen, reinigen en opnieuw inzetten aanblijft, verwijder de lens uit het oog en neem contact op met uw contactlensspecialist/opticien.

Het negeren van deze symptomen kan dit leiden tot ernstige beschadigingen.



Bausch & Lomb Incorporated  
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum van uitgifte: JJJJ-MM-DD



Geeft de CE conformiteitsmarkering aan en het nummer van de op de hoogte gebrachte instantie



Temperatuurbepering

®/™ verwijzen naar handelsmerken van Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated.