

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

Bausch + Lomb ReNu[®] MultiPlus Fresh Lens Comfort[™] multi-purpose solution

LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

GEBRUIKSAANWIJZING: Volg deze eenvoudige stappen om uw lenzen dagelijks te reinigen, desinfecteren en proteïne te verwijderen.

STAP 1:

Breng 3 druppels ReNu MultiPlus Fresh Lens Comfort multi-purpose solution aan op elke kant van de lens en wrijf de lens gedurende 20 seconden voorzichtig schoon.

STAP 2:

Spoel elke kant van de lens grondig gedurende 5 seconden af met ReNu MultiPlus Fresh Lens Comfort multi-purpose solution.

STAP 3:

Plaats de gereinigde contactlens in de lenshouder en vul deze met verse ReNu MultiPlus Fresh Lens Comfort multi-purpose solution. Laat de lenzen tenminste 4 uur in de vloeistof staan. Zorg dat u altijd verse lensvloeistof gebruikt.

Uw contactlenzen zijn nu klaar voor gebruik. Afspoelen met een zoutoplossing is niet nodig. Als er nog vuil op de contactlenzen zit, spoel deze dan af met ReNu MultiPlus Fresh Lens Comfort multi-purpose solution voordat u de contactlenzen inzet.

Volg altijd het advies van uw contactlensspecialist. Op basis van de samenstelling van uw traanvocht en draagschema, kan uw contactlensspecialist aanvullende producten of procedures aanbevelen.

BEWAREN: U kunt uw lenzen maximaal 30 dagen in een afgesloten lenshouder bewaren.

INHOUD: Een steriele, isotone vloeistof die HYDRANATE[®] (hydroxyalkylfosfonaat) 0.03%, boorzuur, edetate disodium, poloxamine 1%, natriumboraat en natriumchloride bevat; geconserveerd met DYMED[™] (polyaminopropyl biguanide) 0,0001%.

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

WERKING:

Reinigt en verwijdert ophopingen van vet, proteïne en andere aanslag en vuil van zachte contactlenzen. Vernietigt schadelijke micro-organismen op de lens. Afspoelen, bewaren en bevochtigen van contactlenzen voor het inzetten.

INDICATIES (voor gebruik):

ReNu MultiPlus Fresh lens Comfort multi-purpose solution is geïndiceerd voor dagelijkse reiniging, het verwijderen van proteïne aanslag, afspoelen, chemische (niet thermische) desinfectie en het bewaren van zachte (hydrofiële) contactlenzen, zoals aanbevolen door uw contactlensspecialist.

CONTRA-INDICATIES (redenen om niet te gebruiken):

Wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen in het product, dit product niet gebruiken.

WAARSCHUWING: PROBLEMEN MET CONTACTLENZEN EN CONTACTLENSVERZORGINGSPRODUCTEN KUNNEN LEIDEN TOT OOGINFECTIES EN ZELFS TOT HET VERLIES VAN HET GEZICHTSVERMOGEN.

Het is essentieel dat u de instructies over de verzorging van uw contactlenzen en contactlensverzorgingsproducten (inclusief lenshouder) op de bijsluiters en verpakkingen van de producten nauwkeurig opvolgt.

Oogproblemen, waaronder ontsteking van het hoornvlies, kunnen zich snel ontwikkelen en kunnen tot verlies van het gezichtsvermogen leiden. Lenzen die zijn ontwikkeld om overdag te dragen, mogen niet worden ingehouden tijdens het slapen. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat de kans op negatieve bijwerkingen toeneemt wanneer deze lenzen 's nachts worden ingehouden.

Lenzen die geschikt zijn om dag en nacht te dragen, moeten regelmatig worden uitgenomen of om te reinigen en te desinfecteren, of om te worden vervangen volgens het vervangingsschema zoals voorgeschreven door uw contactlensspecialist. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat negatieve bijwerkingen vaker voorkomen bij dragers van lenzen die dag en nacht (tijdens het slapen) worden ingehouden ten opzichte van dragers van lenzen die alleen overdag worden gedragen. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat de kans op negatieve bijwerkingen toeneemt naarmate lenzen, geschikt om dag en nacht te dragen, langer worden doorgedragen en dus minder vaak worden gereinigd en gedesinfecteerd dan wel vervangen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat rokers

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

vaker last hebben van negatieve bijwerkingen. Indien irritatie of overmatig tranen optreedt, aanhoudt of toeneemt of indien uw gezichtsvermogen verslechtert, staak het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw contactlensspecialist. Draggers van contactlenzen wordt aangeraden om minimaal twee keer per jaar hun contactlensspecialist te bezoeken. Iedere keer dat u uw contactlenzen in de lenshouder bewaart, moet u deze vullen met verse contactlensvloeistof. Hergebruik nooit de oude vloeistof. Gooi de contactlensvloeistof direct weg nadat u uw lenzen uit de lenshouder heeft gehaald. U mag uw lenzen nooit behandelen met water of bewaren in een lenshouder die is omgespoeld met water, zij het kraanwater, flessenwater of gedistilleerd water of een andere niet-steriele vloeistof. Gooi eerst uw lenshouder leeg, reinig en spoel deze vervolgens om met ReNu MultiPlus Fresh lens Comfort multi-purpose solution. Laat uw lenshouder na ieder gebruik aan de lucht drogen. Vervang iedere maand uw lenshouder.

Waarschuwing: Indien u nalaat de vloeistof na ieder gebruik uit de lenshouder weg te gooien of water gebruikt bij de verzorging van uw lenzen, kan dit leiden tot ooginfecties en mogelijk verlies van het gezichtsvermogen. Zie de meegeleverde bijsluiters voor belangrijke aanvullende veiligheidsvoorschriften.

VOORZORGSMATREGELEN:

- Volg altijd de gebruiksaanwijzing bij het product op. Indien u de gebruiksaanwijzing van het product niet volgt, kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.
- Bezoek regelmatig uw contactlensspecialist.
- Was en droog altijd eerst uw handen voordat u uw lenzen aanraakt.
- Gebruik geen kraanwater, flessenwater of speeksel om lenzen of de lenshouder mee te reinigen.
- Gebruik alleen verse contactlensvloeistof om contactlenzen te reinigen en te desinfecteren.
- Gooi na ieder gebruik de contactlensvloeistof in de lenshouder weg.
- Zoutoplossingen of oogdruppels desinfecteren uw lenzen niet.
- Volg altijd het vervangingsschema van contactlenzen en contactlensvloeistof zoals geadviseerd.
- Gebruik iedere maand een nieuwe lenshouder.
- Zorg om infecties te voorkomen dat de bovenkant van de lenshouder nergens mee in contact komt. Plaats na gebruik de dop direct terug.

BAUSCH+LOMB

ReNu[®]
MultiPlus
multi-purpose solution

- Gebruik dit product niet in combinatie met oogheelkundige medicijnen, tenzij onder medische begeleiding.
- Niet gebruiken voor de thermische desinfectiemethode.
- Sluit de fles na gebruik goed af.
- Houd u aan de houdbaarheidsdatum zoals vermeld op de verpakking en de fles.
- Gooi 90 dagen na opening de resterende contactlensvloeistof in de fles weg.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Bewaren op kamertemperatuur.

BELANGRIJK: Indien irritatie of overmatig tranen optreedt, aanhoudt of toeneemt of indien uw gezichtsvermogen verslechtert, staak het gebruik en neem onmiddellijk contact op met uw contactlensspecialist.

®/™ zijn handelsmerken van Bausch & Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen.

© Bausch & Lomb Incorporated